


Cool Liner

VSC et standard

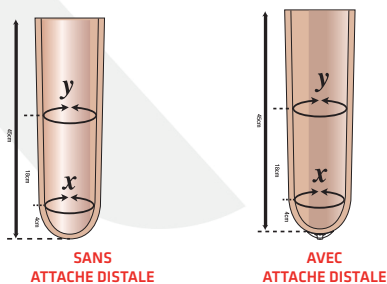

Comment déterminer la taille :

1. Mesurer la circonférence du moignon à 4 cm de l'extrémité distale. Arrondir au nombre inférieur.
Trouver ce nombre dans la ligne supérieure horizontale.

2. Mesurer la circonférence du moignon à 18 cm de l'extrémité distale (MTP dans le tableau). Arrondir au nombre inférieur.
Trouver ce nombre dans la ligne verticale gauche.

3. La couleur de la case correspondant à l'intersection de ces 2 nombres donne la taille du Cool Liner de votre patient.

Exemple : 43 cm de circonférence distale et 51 cm de circonférence MTP commander un X-Large Uniform.

		CIRCONFÉRENCE DISTALE (cm)																															
		17	18	19	21	22	23	24	25.5	26.5	28	29.5	30.5	31.5	33	34	35	36.5	38	39.5	41	42	43	44.5	46	47	48	49.5	51	52	53	55	
CIRCONFÉRENCE MTP (cm)	21																																
	22																																
	23																																
	24																																
	25.5																																
	26.5																																
	28																																
	29.5																																
	30.5																																
	31.5																																
	33		(1)	(1)																													
	34		(1)	(1)																													
	35		(1)	(1)																													
	36.5		(1)	(1)	(1)																												
	38			(2)	(2)																												
	39.5			(2)	(2)																												
	41			(2)	(2)																												
	42			(2)	(2)																												
	43			(2)	(2)																												
	44.5			(2)	(2)																												
	46			(2)	(2)																												
47																																	
48																																	
49.5																																	
51																																	
52																																	
53																																	
54.5																																	
56																																	
57																																	
58.5																																	
60																																	
61																																	
62																																	
63.5																																	
65																																	
66																																	

(1): **Med. Tapered = 17/22**

(2): **Med. + Tapered = 18/28**