

OKO

OKO SOLUTION

#APARTOFOYOU

Confetti+

ESTHÉTIQUES DE PROTHÈSES FÉMORALES

© Copyright 2022 OKO Solution S.A.S., Roussé - France - 06/05/2022 - Sous réserve de modifications techniques et de délais d'impression



OKO Solution S.A.S - Distributeur Exclusif France et DROM COM des esthétiques Id Ethnos


www.okosolution.fr

SCHÉMA D'INSTALLATION	3
DESCRIPTION DU PRODUIT	
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	4
ACCESSOIRES	4
COULEURS DISPONIBLES	4
AVERTISSEMENT GÉNÉRAL	
LIMITE DE POIDS	5
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	5
TERRAIN	5
MANIPULATION INCORRECTE DE L'EMBALLAGE	5
COMPATIBILITÉ	5
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	
UTILISATION	5
MAINTENANCE	
NETTOYAGE	6
STOCKAGE	6
ÉLÉMENTS D'ENTRETIEN	6
CONNAISSEZ VOTRE CONFETTI +	6
COMMENT EFFECTUER LE RÉGLAGE DE VOTRE CONFETTI +	7
SPECIFICATIONS ET MESURES	7
JURIDIQUE	
GARANTIE	8





OKO SOLUTION le choix des plus grandes marques de l'orthopédie mondiale. **Prothèses, Orthèses, Matériaux, Machines**, une offre unique sur le marché du grand appareillage avec une gamme complète et diversifiée de plus de 10000 références, adaptées à chacune de vos problématiques.

Informations de commandes

Un service de livraison qui prend en charge vos produits le jour même. 80 % des commandes sont livrées en moins de 24 h depuis notre entrepôt. Nos partenariats avec , TNT et Chronopost vous assure une fiabilité de livraison en France et dans les DROM COM.

Toutes les commandes doivent être envoyées par email à commandes@okosolution.com, par téléphone au 04 88 19 60 10 ou par Fax au 04 42 29 50 43

SCHÉMA D'INSTALLATION

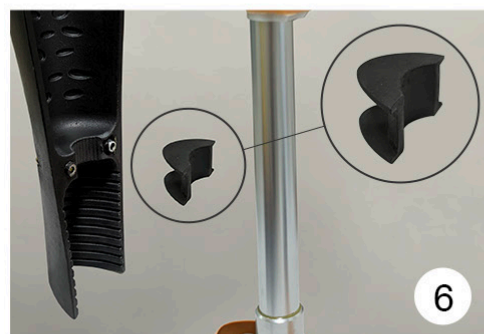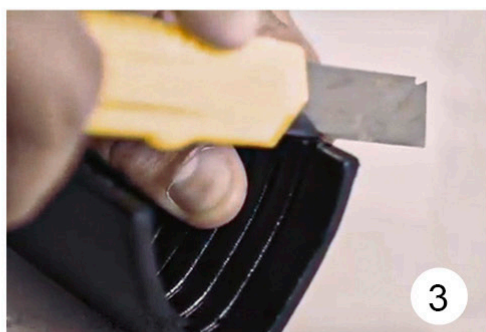

INFORMATIONS

DATE DE DERNIÈRE MISE À JOUR : 18/02/2022.

- Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit
- Respectez les consignes de sécurité afin d'éviter toutes blessures ou endommagement du produit
- Informer l'utilisateur et l'accompagnateur sur une utilisation correcte et sûre du produit
- Gardez ce document pour s'y référer à l'avenir
- Vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter OKO SOLUTION via les contacts indiqués à la fin de ce manuel

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le CONFETTI PLUS est destiné exclusivement aux amputés des membres inférieurs porteurs de prothèses avec amputation trans fémorale. Désarticulation de hanche et désarticulation de genou .

ATTENTION : CONFETTI PLUS est destiné aux adultes

1.1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Fabriqué en polyuréthane
- Bipartite
- Adaptable aux mesures de taille du patient, il est facilement ajustable
- Forme symétrique
- Unisexe
- Personnalisable.

1.2 ACCESSOIRES

- Manuel d'instructions
- Esthétique complète
- 1 douille
- 4 vis Allen M4 X 30MM
- 1 clé Allen
- Sac en coton

IMPORTANT : N'utilisez que des accessoires originaux avec votre CONFETTI+.

1.3 COULEURS DISPONIBLES

RÉFÉRENCES :

- CONFETTI+
- ICFPAK-BLK CONFETTI+ BLACK;
- ICFPAK-LTBEIGE CONFETTI+ LIGHT BEIGE;
- ICFPAK-BEIGE CONFETTI+ BEIGE;
- ICFPAK-BROWN CONFETTI+ BROWN.

2. AVERTISSEMENT GÉNÉRAL

La housse peut être réglée en fonction de la taille du patient comme indiqué au point 7 de ce manuel.

Lorsque vous ouvrez votre CONFETTI+, assurez-vous qu'il est en parfait état. En cas de problème, veuillez nous contacter immédiatement via les canaux disponibles.

2.1 LIMITE DE POIDS

Il n'y a pas de limite de poids.

2.2 CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Le contact avec l'eau ou un excès d'humidité peut endommager le Confetti+, par conséquent :

a. Il n'est pas recommandé d'utiliser Confetti+ sous la pluie, dans une piscine ou dans des endroits où il y a de l'eau.

Le Confetti+ ne fournit pas de protection imperméable, et par conséquent, une oxydation des composants peut se produire, réduisant ainsi la durée de vie du produit ;

b. Si votre Confetti+ est mouillé, séchez-le dès que possible.

2.3 TERRAIN

Évitez d'utiliser le Confetti+ dans du sable, un sol meuble ou sur un terrain de gravier meuble. Cela pourrait endommager les composants.

2.4 MANIPULATION INCORRECTE DE L'EMBALLAGE

Assurez-vous que les matériaux d'emballage sont hors de portée des enfants car il peut y avoir un risque d'étouffement.

3. COMPATIBILITÉ

Le CONFETTI+ est disponible pour la plupart des modèles de prothèses actuels. Consultez votre prothésiste pour plus d'informations concernant la compatibilité.

4. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

a. Utilisez une clé Allen pour les vis ;

b. La coupe pour le réglage de la hauteur doit être effectuée en fonction des mesures du patient, comme indiqué au point 7 de ce manuel.

ATTENTION !

Au contact avec le froid, la chaleur, les braises ou le feu. Des blessures (par ex. brûlures) peuvent être causées par la fonte du matériau et l'endommagement du produit

- Tenez le produit à l'écart des flammes nues, des braises et autres sources de chaleur
- N'exposez pas le produit à des températures supérieures à +80°C ou inférieures à -20°C

4.1. UTILISATION

- Vérifiez que le produit n'est pas endommagé avant de l'utiliser
- N'utilisez pas le produit en cas de limitations de fonctionnement
- Ce produit n'a pas d'effets secondaires
- En cas de dommages irréparables à la structure du produit, tels que des fissures dues à des chutes ou des impacts, son utilisation doit être immédiatement interrompue en raison du risque de coupures lors de sa manipulation.

5. MAINTENANCE

- a. Inspecter et maintenir le Confetti+ en parfait état ;
- b. Au moins une fois par an, amenez le chez votre orthoprothésiste pour une inspection complète ;
- c. Nettoyez régulièrement le couvercle comme indiqué au point 5.1 de ce manuel ;
- d. Réparer ou remplacer les pièces usées ou cassées avant utilisation ;
- e. Si un entretien plus spécifique est nécessaire, contactez votre orthoprothésiste.

5.1 NETTOYAGE

5.1.1 LE CONFETTI+

- a. Nettoyer avec un chiffon sec, chaque fois que nécessaire

5.1.2 VIS

- a. Enlevez toute peluche, poussière ou saleté sur les vis.

5.2 STOCKAGE

- a. Stockez votre Confetti+ dans un endroit propre et sec, en évitant l'oxydation de certains composants ;
- b. Avant de l'utiliser, assurez-vous qu'il est parfaitement fonctionnelle. Inspectez-le.

*INFORMATION SUR LA MISE AU REBUT

Une CONFETTI+ doit être mise au rebut conformément aux réglementations environnementales de votre région.

5.3 ÉLÉMENTS D'ENTRETIEN


5.3.1 VIS

Vérifiez toujours les vis. Si elles ne sont pas en parfait état, elles endommageront la structure et nuiront aux performances du Confetti+.


5.3.2 STRUCTURE

Inspectez la structure de la couverture tous les 3 mois et vérifiez l'absence de fissures ou d'entailles.

6. CONNAISSEZ VOTRE CONFETTI+

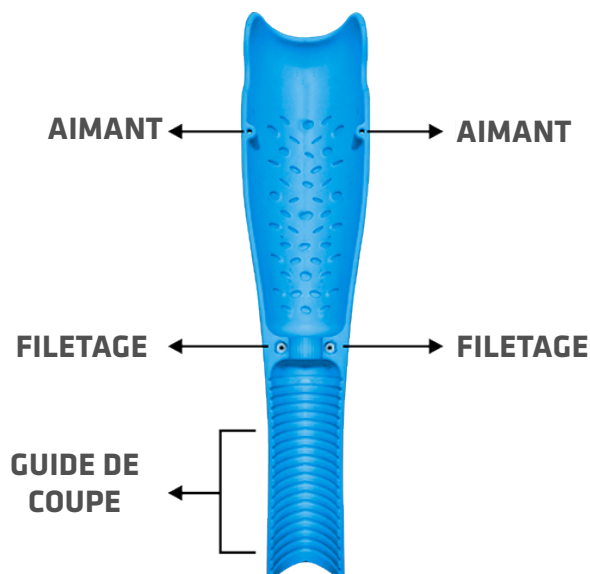

VUE FACE AVANT

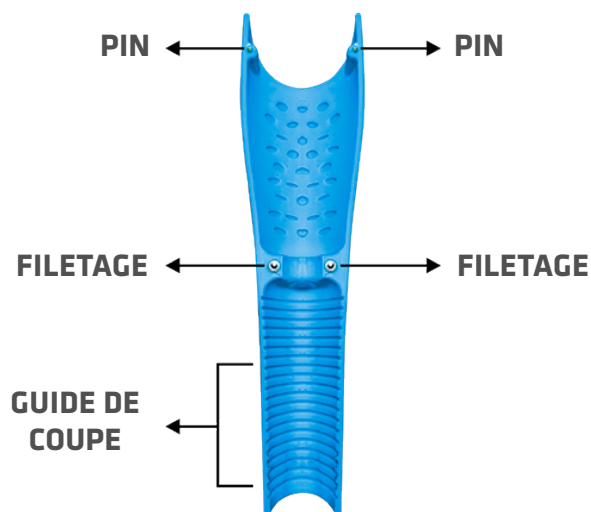

VUE ARRIÈRE INTERNE

7. COMMENT EFFECTUER LE RÉGLAGE DE VOTRE CONFETTI+ ? (Voir schéma page 3)

1. Assurez-vous qu'il est aligné près du genou de manière à ne pas gêner le fonctionnement des composants (Image 1)
2. Tracez l'endroit où il doit être coupée et faites une coupe droite avec un objet tel que : couteau, scie, cutter, autres ; (Images 2, 3 et 4). Ne pas couper le CONFETTI+ en le laissant trop près de la base supérieure du pied, car cela peut perturber le mouvement. Nous conseillons qu'il ait un jeu de 5 mm
3. Fixez les deux parties du CONFETTI+ pour délimiter l'endroit où le dos doit être coupé. Effectuez la coupe de la même manière qu'à l'étape précédente
4. Ajustez le « couvercle » sur la prothèse pour délimiter correctement l'endroit où le tube sera situé (Image 5)
 - 4.1. Pour les tubes de 30 mm, il faut utiliser la bague fournie avec le kit (image 6). Elle peut être utilisée aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du couvercle, en fonction de la nécessité de placer ou de réorganiser le CONFETTI+ à l'avant
5. Serrez les vis avec la clé fournie avec le kit (Image 7)
6. Vérifiez que le couvercle soit correctement fixé (Image 8)

ATTENTION !

- Une fois le « couvercle » découpé, il n'est plus possible de le coller ou de le réajuster.
- Nous vous conseillons de vous adresser à un professionnel qualifié pour effectuer les réglages de la découpe.
- Lorsque vous placez le clip de l'anneau sur le tube de votre prothèse, veillez à ne pas trop l'ouvrir, car il pourrait se casser.

8. SPECIFICATIONS & MESURES

SPÉCIFICATIONS	MESURES
Hauteur frontale (cm)	51
Largeur totale de la partie frontale (cm)	11
Profondeur de la partie frontale (cm)	6,5
Hauteur de la partie arrière (cm)	42,5
Profondeur de la partie arrière (cm)	5,5
Poids total (g)	600

9. JURIDIQUE

1. GARANTIE

1. Le fabricant garantit cet appareil à partir de la date d'achat. La garantie couvre les défauts dont il peut être prouvé qu'ils sont la conséquence directe de défauts de matériau, de production ou de construction et qui sont signalés au fabricant pendant la période de garantie. La décision de remplacement ou de réparation des pièces défectueuses sera prise en fonction de critères techniques. La garantie ne couvre pas l'usure normale de l'équipement ni les coupes inappropriées. Cette garantie couvre les défauts qui surviennent dans des conditions normales. En ce qui concerne la réparation ou le remplacement de pièces rendues inutilisables ou endommagées, les frais tels que le fret, les séjours ou les techniciens ne sont pas inclus
2. L'acheteur a pris connaissance du manuel fourni et est tenu de respecter les points concernant les précautions de conservation et de sécurité prescrites, pendant la période de garantie et après, même si le matériel n'est pas utilisé. Sur demande, l'acheteur recevra des copies gratuites de ce manuel
3. L'acheteur est informé que les services d'entretien du fabricant sont disponibles
4. Lorsqu'un problème est constaté, l'acheteur doit immédiatement contacter OKO SOLUTION pour bénéficier de la garantie

LA GARANTIE CESSE LORSQUE :

- Il y a résultat d'une négligence, d'actes de vandalisme, d'une utilisation inappropriée ou en désaccord avec les recommandations d'ID ETHNOS
- Il y a absence d'entretien recommandé, modification de l'équipement ou des pièces ou mauvaise utilisation
- L'équipement est endommagé accidentellement
- L'entretien ne suit pas les directives de ce manuel
- Utilisation de pièces non originales
- Dommages dus à des conditions environnementales anormales telles que : température excessive, humidité excessive, poussière, gaz, soleil direct, pluie et inondation
- Le « couvercle », ou une partie de celui-ci, est stocké dans un endroit inapproprié et exposé aux conditions climatiques
- CONFETTI+ subit un processus de réglage inapproprié

La garantie ne s'applique que lorsque le produit est utilisé dans les conditions spécifiées et aux fins pour lesquelles il est prévu. N'utilisez pas et n'installez pas sur votre Confetti+ un composant tiers qui n'est pas approuvé par ID ETHNOS.



EXPRIMEZ VOTRE IDENTITÉ

VOTRE ORTHOPROTHÉSISTE



ORTHÈSES | PROTHÈSES | MATÉRIAUX | MACHINES

Rousset Parc II - 157 avenue Gaston Imbert - 13790 Rousset - FRANCE
Tél : 04 88 19 60 10 | Fax : 04 42 29 50 43 | commandes@okosolution.fr | www.okosolution.fr