



NOUVEAU


Code LPP 7110016

- 1.** Demander au patient de venir avec une chaussure à lacets pour le premier essai. Des baskets par exemple.



- !** (A) Il faut des oeillets pour fixer l'extrémité avant l'orthèse.
(B) Une semelle volumineuse + un rebord pour l'adhérence du talon par friction.
(C) Une matière robuste

- 2.** Valider la taille de vos chaussures et choisir la bonne taille d'orthèse. LARGE – MEDIUM – SMALL - PEDI (Référez vous au tableau des tailles)

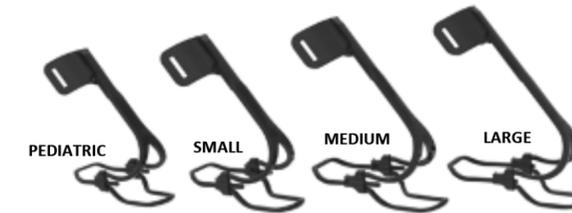

- 3.** Ajuster la longueur à la taille de la chaussure et à la hauteur du mollet.



Pour faire glisser l'avant, relâcher la vis de blocage avec une clé hexagonale de 7/64" INCLUSE. (Voir tableau des tailles)



Support d'embrasse coulissant.
Haut <---> Bas



Pour l'enlever :
Plier et exercer une légère torsion.



Engager l'embrasse, la pousser vers le bas jusqu'à ce que la languette de verrouillage s'engage dans le trou de verrouillage qui correspond à la hauteur souhaitée.

- 4.** Fixer la partie avant de l'AT-X par les oeillets de la chaussure avec des serflex.

! Resserer les serflex au maximum, une fixation solide est la clé pour maximiser le comportement de l'orthèse. **!**

! Il ne faut jamais attacher les serflex aux lacets !



12/04/2021