

NOUVEAU

Code LPP 7110016

AT-X Orthèse d'essai
Outils d'évaluation XTERN
Orthèse d'essai réglable (AFO)

	Homme	Femme	XTERN AFO & AT-X	ATX	ATX	ATX
	Taille	Taille		Large	Small	Pedi
	FR	FR	Selectionnez une taille	Medium		
				AT-X ajustement de la longueur		
	50,5		Large	61		
	50		Large	57		
	49,5		Large	53		
	49		Large	50		
	48,5		Large	46		
	48		Large	42		
	47,5		Large	38		
	47		Large	34		
	46		Large	31		
	45,5		Large	28		
	45		Large	25		
Enfant	44,5	44	Medium	22		
	44	43	Medium	19		
FR	43	42,5	Medium	16	52	
	42,5	42	Medium	13	49	
	41	41	Medium	11	46	
	40,5	40,5	Medium Small	7	43	
	40	40,5	Medium Small	3	40	
	39	40	Small	0	37	
	38,5	39	Small		34	
	38	38,5	Small		30	
	37,5	38	Small		26	
	36,5	37,5	Small		22	
	36	36,5	Small		18	36
	35,5	36	Small		13	32
	35	35,5	Small		9	29
	34	35	Small Pedi		5	24
	33,5	34,5	Small Pedi		1	21
	33		Pedi			18
	32		Pedi			16
	31		Pedi			13
	30		Pedi			9
	29,5		Pedi			4
	28		Pedi			1
	27,5		Pedi			-3
	27		Pedi			---
	26,5		Pedi			---



XTERN AFO KITS
Large-Medium-Small-Pediatric
(se référer au tableau des tailles)

AT-X ORTHÈSE D'ESSAI



XTERN ORTHÈSE D'ESSAI
- AJUSTABLE -
Large-Medium-Small-Pediatric
(se référer au tableau des tailles)

○ Choisir la taille parmi les largeurs ○



Ajuster la hauteur de l'embrasse au patient en faisant coulisser
Haut <--> Bas



Ajuster la longueur à la taille de la chaussure.
(voir le tableau des tailles)
Relacher la vis de blocage avec une clé hexagonale



Attacher solidement les serflex aux oeilletons
Ne jamais attacher les serflex aux lacets !
Essayer avec des chaussures à lacets, robustes ou encore des baskets

Voir le document sur les 5 étapes de base pour l'évaluation du patient