

9




Installer l'habillage
(instruction dans le sac)

La largeur de l'embrasse peut être ajustée plus largement ou étroitement et s'adapte à la chaussure du patient

(Consulter le guide de thermoformage si besoin)

10

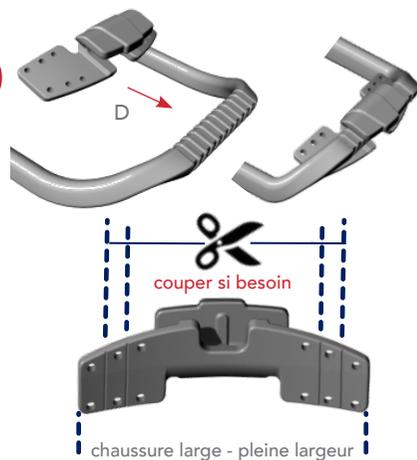

couper si besoin

chaussure large - pleine largeur

XTERN[®]
by TurboMed™

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

XTERN KIT D'ORTHÈSE SEMI-ASSEMBLÉ

● TAILLE SMALL (MXT-KIT-S)



Taille Femme du 34 au 39
Taille Homme du 34,5 au 41

11 Chaussures faciles à ajuster pour le premier essai : baskets

Besoin d'oeillets



Fabrication robuste



Une semelle volumineuse +
un rebord pour l'adhérence
du talon par friction

Nous recommandons des
chaussures stables avec un talon ferme,
un matériau robuste et un contour
préminent sur le contour de la semelle
Éviter les chaussures minimalistes avec
une semelle fine et peu de matière

NOUVEAU

Code LPP 7110016


TurboMed[™]
ORTHOTICS

OUTILS NÉCESSAIRES

- Perceuse
 - Mèche 7/64" (2,8mm)
 - Clé allen hexagonale 1/16" incluse
 - Scie à métal à main
 - Mètre ruban
 - étau d'établi avec mâchoire à coussinet souple
 - Machine à fraiser
 - Cutter
 - Pistolet à air chaud min 120°C
- Si le thermoformage est nécessaire

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Lunette de sécurité, gants, masque anti-poussière et toute autre protection requise par votre politique de santé et de sécurité au travail

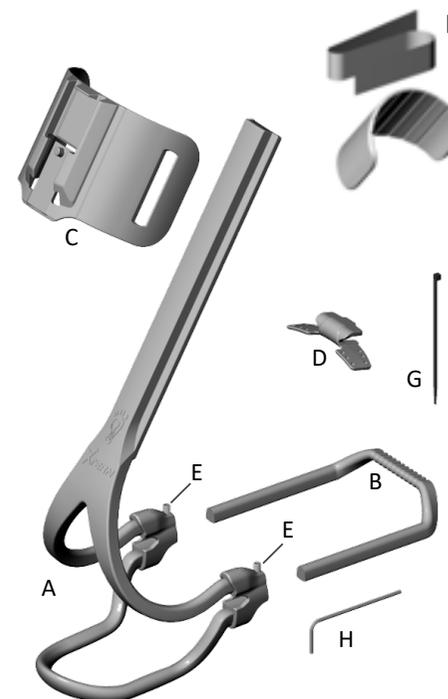

12/04/2021

OKO
OKO SOLUTION

www.okosolution.fr T: 04 88 19 60 10

p1

p4

www.okosolution.fr T: 04 88 19 60 10

12



Rechercher la position des oeillets

13



Demander au patient de mettre
la chaussure et sélectionner
l'intervalle des trous

14



Installer les serflex dans les oeillets
Ne jamais les attacher aux lacets !

15



Bloquer les attaches dans les
coins vers l'arrière ou dans la
meilleure position possible

16




Serrer les serflex au maximum
Une bonne fixation c'est très important !
Tirer fermement sur le clip du lacet et
valider qu'il est solidement ancré et collé
à la chaussure


17



Accrocher XTERN à la chaussure et vous
êtes prêt pour l'action !
**Voir la documentation sur la fixation du
clip pour plus d'option en matière de
chaussure (tuto disponible sur youtube)**

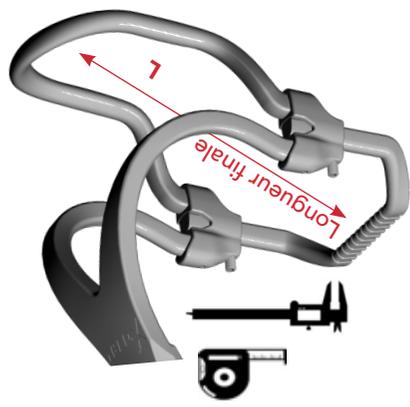


3

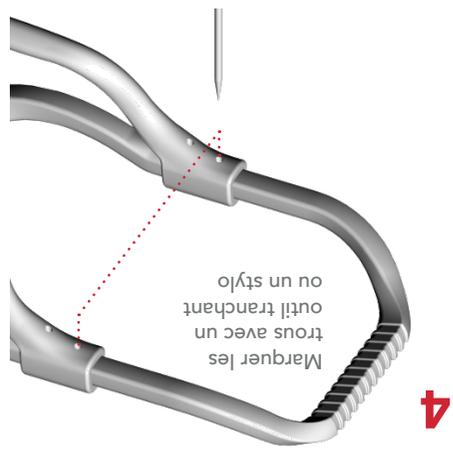

4

Tableau de mesure de la longueur

Taille		XTERN Kit SMALL													
Homme	Femme	Longueur finale (mm)	L	160	164	168	171	175	180	183	187	190	193	196	199
FR	FR	34,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37,5	38	38,5	39	39	40	40,5
41	40,5	40	39	38,5	38	37,5	36,5	36	35,5	35	34,5	34	34	34,5	35

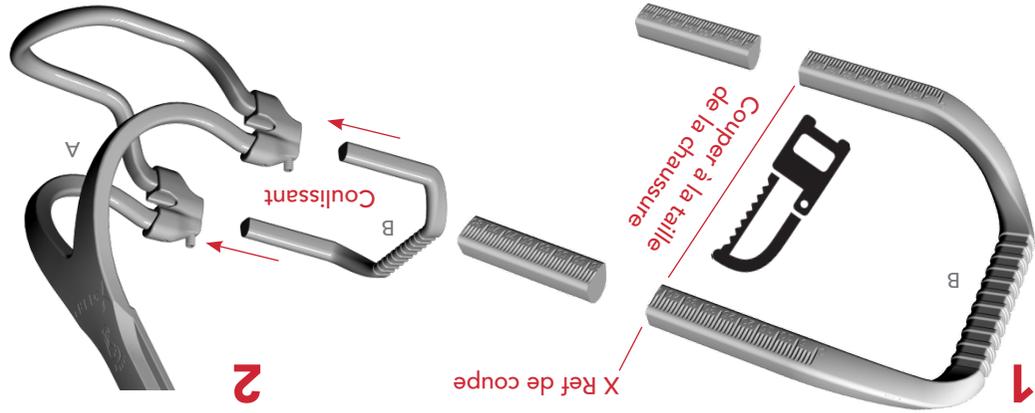


2

Tableau de coupe pour l'ajustement de la longueur

Taille		XTERN Kit SMALL													
Homme	Femme	Ref de coupe X	14	18	22	25	30	34	38	42	46	49	52	55	
FR	FR	34,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37,5	38	38,5	39	40	40,5	
41	40,5	40	39	38,5	38	37,5	36,5	36	35,5	35	34,5	34	34	34,5	


Voir les graduations sous la section en «U»

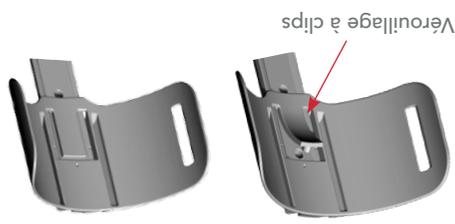

9



7

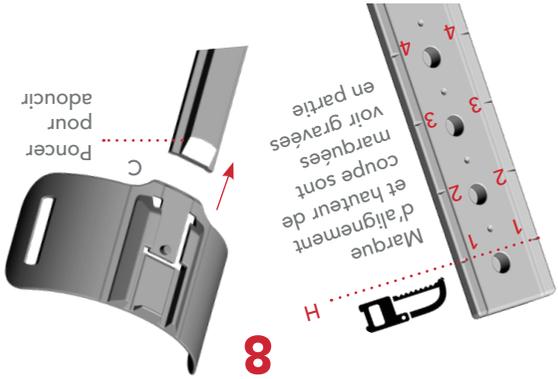

8




10


Vérifier la position de l'embrasse avant de couper ⚠ Bien regarder les marques numériques

Tableau d'ajustement de l'embrasse

Taille		XTERN Kit SMALL													
Homme	Femme	Longueur finale (mm)	H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
FR	FR	34,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37,5	38	38,5	39	40	40,5	
41	40,5	40	39	38,5	38	37,5	36,5	36	35,5	35	34,5	34	34	34,5	

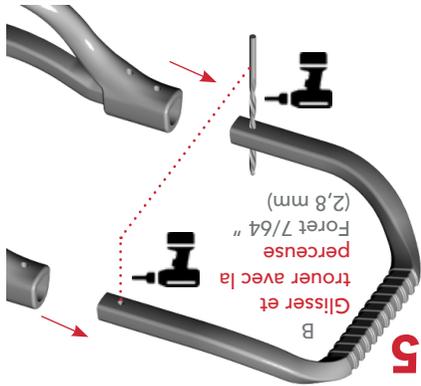

5

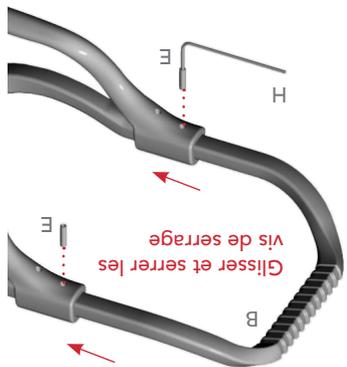

6