

9




Installer l'habillage  
(instruction dans le sac)

La largeur de l'embrasse peut être ajustée plus largement ou étroitement et s'adapte à la chaussure du patient

(Consulter le guide de thermoformage si besoin)

10

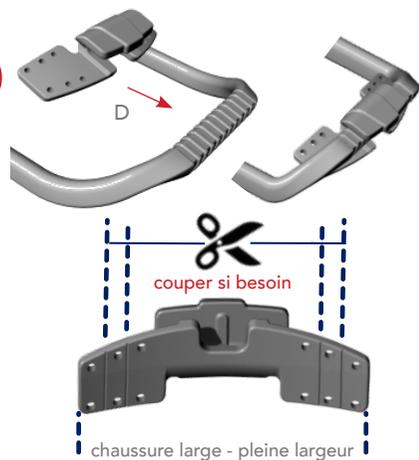

couper si besoin

chaussure large - pleine largeur



## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

XTERN KIT D'ORTHÈSE SEMI-ASSEMBLÉ

- TAILLE LARGE (MXT-KIT-L)
- TAILLE MEDIUM (MXT-KIT-M)



Taille Femme du 34 au 39  
Taille Homme du 34,5 au 41

## 11 Chaussures faciles à ajuster pour le premier essai : baskets



Besoin d'oeillets

Fabrication robuste

Une semelle volumineuse +  
un rebord pour l'adhérence  
du talon par friction

Nous recommandons des chaussures stables avec un talon ferme, un matériau robuste et un contour proéminent sur le contour de la semelle  
Éviter les chaussures minimalistes avec une semelle fine et peu de matière

NOUVEAU

Code LPP 7110016




## OUTILS NÉCESSAIRES

- Perceuse
  - Mèche 7/64" (2,8mm)
  - Clé allen hexagonale 1/16" incluse
  - Scie à métal à main
  - Mètre ruban
  - étau d'établi avec mâchoire à coussinet souple
  - Machine à fraiser
  - Cutter
  - Pistolet à air chaud min 120°C
- Si le thermoformage est nécessaire

## ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Lunette de sécurité, gants, masque anti-poussière et toute autre protection requise par votre politique de santé et de sécurité au travail

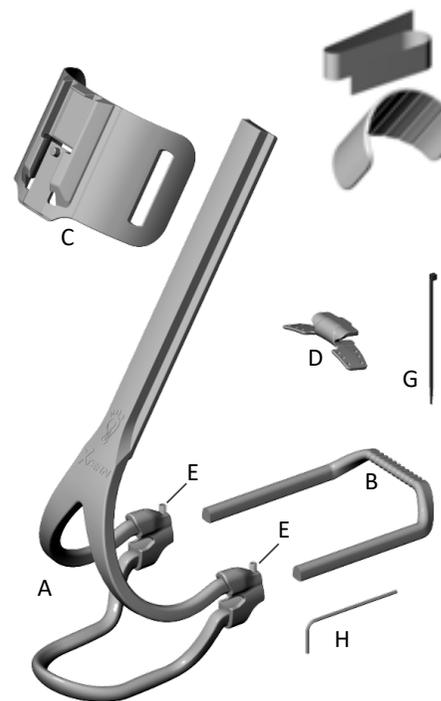

12/04/2021



12



Rechercher la position des oeillets

13



Demander au patient de mettre la chaussure et sélectionner l'intervalle des trous

14



Installer les serflex dans les oeillets  
**Ne jamais les attacher aux lacets !**

15



Bloquer les attaches dans les coins vers l'arrière ou dans la meilleure position possible

16



Serrer les serflex au maximum  
**Une bonne fixation c'est très important !**  
Tirer fermement sur le clip du lacet et valider qu'il est solidement ancré et collé à la chaussure


17



Accrocher XTERN à la chaussure et vous êtes prêt pour l'action !  
**Voir la documentation sur la fixation du clip pour plus d'option en matière de chaussure (tuto disponible sur youtube)**

Taille		XTERN Kit MEDIUM																XTERN Kit LARGE						
Homme	Femme	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	
40,5	40,5	41	42	42,5	43	44	44,5	45	45,5	46	47	47,5	48	48,5	49	49,5	50	50,5						
Ref de coupe	X	22	25	29	31	34	37	40	43	46	50	53	57	60	65	69	73	77	79					




Tableau de coupe pour l'ajustement de la longueur

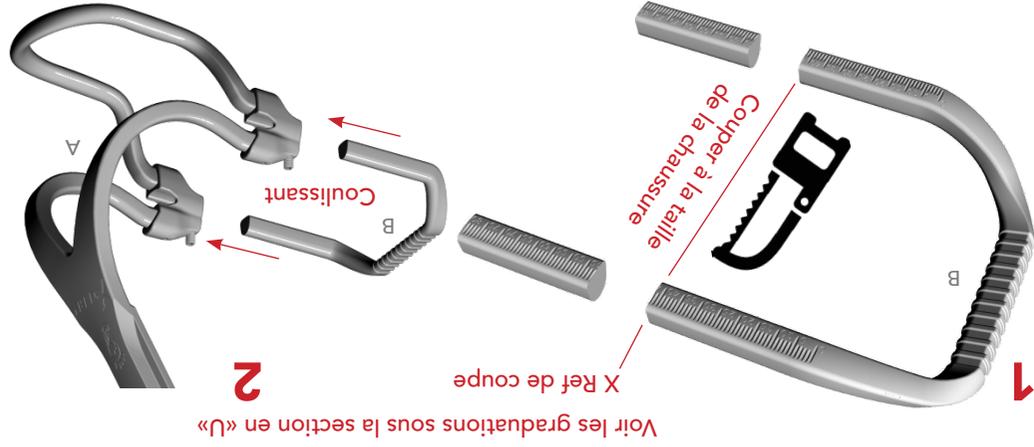


Voir les graduations sous la section en «U»

Taille		XTERN Kit MEDIUM																XTERN Kit LARGE						
Homme	Femme	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	
40,5	40,5	41	42	42,5	43	44	44,5	45	45,5	46	47	47,5	48	48,5	49	49,5	50	50,5						
Longueur finale (mm)	L	196	199	203	205	208	211	214	217	220	223	226	230	233	237	241	244	248	252					

Tableau de mesure de la longueur

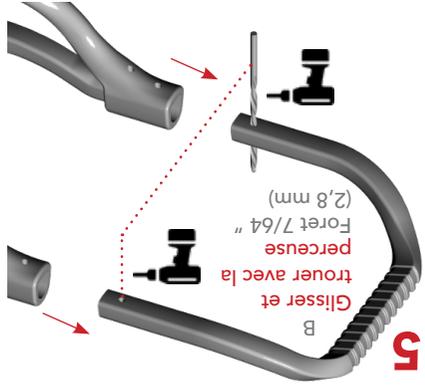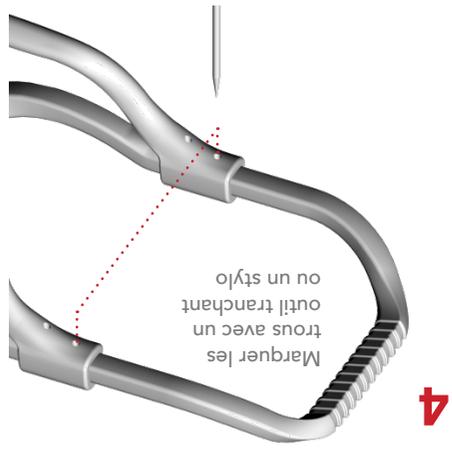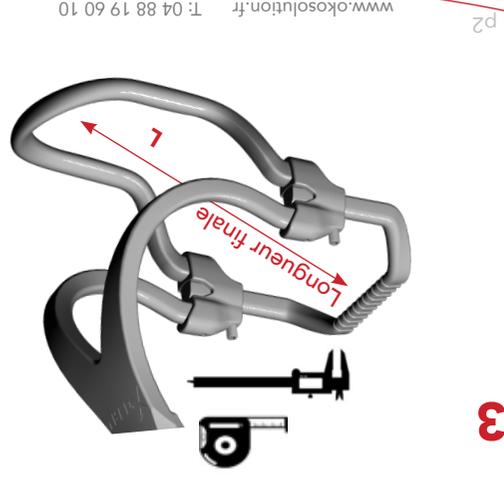

5

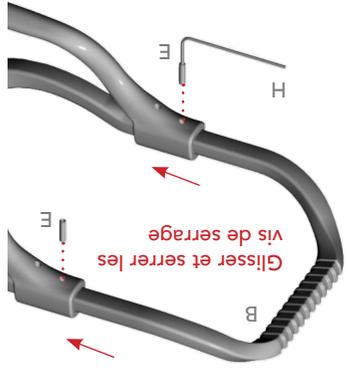


6

Taille		XTERN Kit MEDIUM																XTERN Kit LARGE						
Homme	Femme	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	
40,5	40,5	41	42	42,5	43	44	44,5	45	45,5	46	47	47,5	48	48,5	49	49,5	50	50,5						
Ref de coupe (mm)	H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Tableau d'ajustement de l'embrasse

⚠ Bien regarder les marques numériques

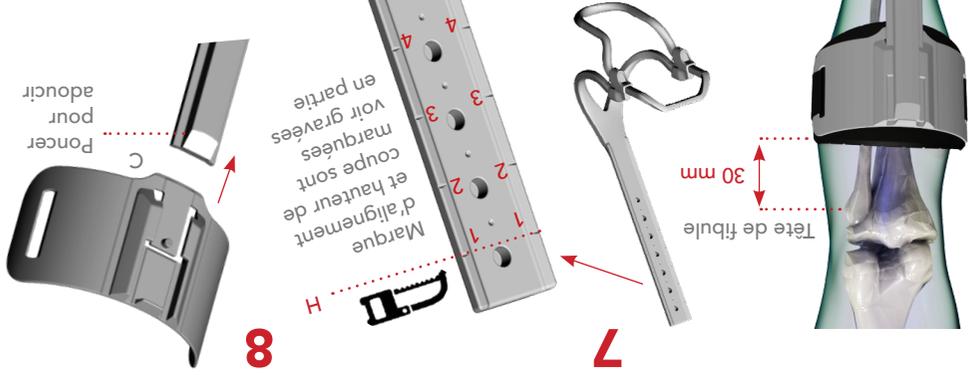


8

Poncer pour adoucir

Marque d'alignement et hauteur de coupe sont voir gravées en partie

Tête de fibule  
30 mm

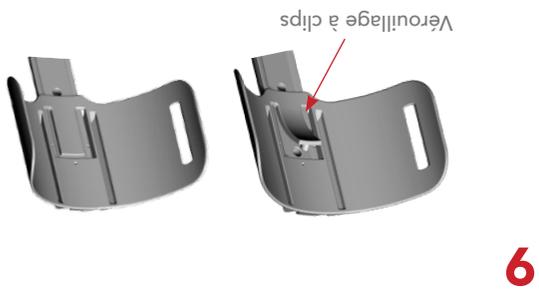

9



10

Retrait de l'embrasse possible (si besoin)