



Une Gamme complète de pieds à restitution d'énergie

## SYNERGY X3



## PARS X3



## TROY PLUS




## SYNERGY X3 LP



OKO SOLUTION Distributeur exclusif des Pieds Ortotek pour la France & les DROM-COM

# Pied SYNERGY X3

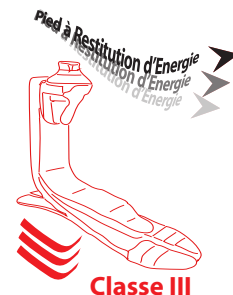

Split Toe



Variable Stiffness



Multi Axial



Vertical Shock



Sport Activity



• **Excellent Confort en Terrain Inégal**

• **X3 = Cadence Variable Homogène**

• **Confort Multi-Axial**

• **Absorption des Chocs Verticaux**

• **Conçu pour les Activités Sportives et aquatiques**

## Caractéristiques :


- Une marche naturelle grâce à la longueur totale du pied, du talon aux orteils, et à sa conception sans vis.
- La conception à 3 lames carbone permet une absorption des chocs verticaux.
- La conception X3 offre une progressivité de la restitution d'énergie.
- Les orteils séparés permettent de marcher confortablement en terrains accidentés.
- Lames en carbone améliorées.
- L'utilisateur peut pratiquer des sports de loisir.
- Pied Aqua compatible\* avec sa Pyramide Titane (eau douce, eau salée, eau chlorée).

\* Attention : il faut rincer abondamment à l'eau tiède après une utilisation dans l'eau.

# Pied SYNERGY X3



SYNERGY X3	
Référence	ORT-SYX3- <b>MXX</b>
Niveau d'Activité	K3,K4
Poids Maximum du patient	147 kg
Tailles disponibles	<b>22-29</b> cm
Hauteur de construction	22-25 cm = 155 mm 26-29 cm = 165 mm
Esthétique (côté)	Droite / Gauche = <b>Y</b>
Couleur de l'esthétique	Caucasian / Brun

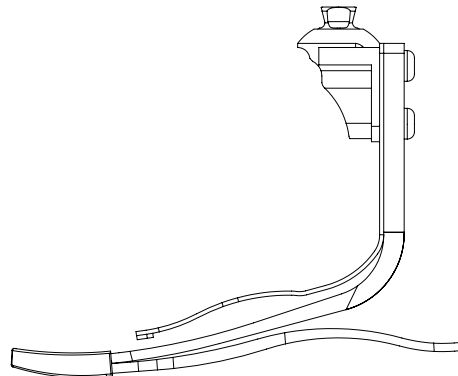

Comment créer sa référence : ORT-SYX3-**MXX**

Patient de 75 kg Impact MOYEN en Taille 27 Gauche couleur CAUCASIAN

Pour le pied : ORT-SYX3-**527**

Pour l'esthétique : ORT-KK-**27L-CAUC**

Comment déterminer son <b>Module</b> ?			
Poids du patient	Niveau d'impact		
	Faible	Moyen	Fort
45-52	1	1	2
53-59	1	2	3
60-68	2	3	4
69-77	3	4	5
78-88	4	5	6
89-100	5	6	7
101-116	6	7	8
117-130	7	8	9
131-147	8	9	
Choix <b>Module</b> (de 1 à 9)			



Référence Esthétique de pied :  
ORT-KK-**XXY-Z**




Esthétique de pied disponible en 2 couleurs (**Z**):  
• CAUCASIAN (**CAUC**)  
• BRUN (**BRUN**)



**L.P.P.R.**  
◀ 2713750

# Pied SYNERGY X3 LP

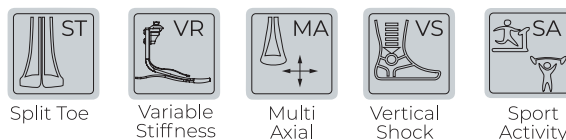

• **Excellent Confort en Terrain Inégal**

• **X3 = Cadence Variable Homogène**

• **Confort Multi-Axial**

• **Absorption des Chocs Verticaux**

• **Conçu pour les Activités Sportives et aquatiques**

## Caractéristiques :

- Une marche naturelle grâce à la longueur totale du pied, du talon aux orteils, et à sa conception sans vis.
- La conception à 3 lames carbone permet une absorption des chocs verticaux.
- La conception X3 offre une progressivité de la restitution d'énergie.
- Les orteils séparés permettent de marcher confortablement en terrains accidentés.
- Lames en carbone améliorées.
- L'utilisateur peut pratiquer des sports de loisir.
- Pied Aqua compatible\* avec sa Pyramide Titane (eau douce, eau salée, eau chlorée).


\* Attention : il faut rincer abondamment à l'eau tiède après une utilisation dans l'eau.



# Pied SYNERGY X3 LP



SYNERGY X3 LP	
Référence	ORT-SYX3LP- <b>MXX</b>
Niveau d'Activité	K3,K4
Poids Maximum du patient	147 kg
Tailles disponibles	<b>22-29</b> cm
Hauteur de construction	22-25 cm = 115 mm 26-29 cm = 125 mm
Esthétique (côté)	Droite / Gauche = <b>Y</b>
Couleur de l'esthétique	Caucasian / Brun

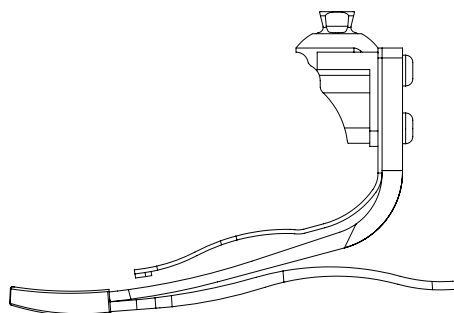

Comment créer sa référence : ORT-SYX3LP-**MXX**

Patient de 75 kg Impact MOYEN en Taille 27 Gauche couleur CAUCASIAN

Pour le pied : ORT-SYX3LP-**527**

Pour l'esthétique : ORT-KK-**27L-CAUC**

Comment déterminer son <b>Module</b> ?			
Poids du patient	Niveau d'impact		
	Faible	Moyen	Fort
45-52	1	1	2
53-59	1	2	3
60-68	2	3	4
69-77	3	4	5
78-88	4	5	6
89-100	5	6	7
101-116	6	7	8
117-130	7	8	9
131-147	8	9	
Choix <b>Module</b> (de 1 à 9)			



Référence Esthétique de pied :  
ORT-KK-**XXY-Z**



Esthétique de pied disponible en 2 couleurs (**Z**):  
• CAUCASIAN (**CAUC**)  
• BRUN (**BRUN**)



**L.P.P.R.**  
◀ **A VENIR**

# Pied PARS X3

1 2 3 4 



Split Toe



Variable Stiffness



Multi Axial



Vertical Shock



Sport Activity

• **Excellent Confort en Terrain Inégal**

• **X3 = Cadence Variable Homogène**

• **Confort Multi-Axial**

• **Absorption des Chocs Verticaux**

• **Conçu pour les Activités Sportives**


## Caractéristiques :

- Une marche naturelle grâce à la longueur totale du pied, du talon aux orteils, et à sa conception sans vis.
- La conception à 3 lames carbone permet une absorption des chocs verticaux.
- La conception X3 offre une progressivité de la restitution d'énergie.
- Les orteils séparés permettent de marcher confortablement en terrains accidentés.
- Son faible encombrement permet l'utilisation d'un amortisseur de chocs et de torsion.
- L'utilisateur peut pratiquer des sports de loisir.

# Pied PARS X3



PARS X3	
Référence	ORT-PAX3- <b>MXX</b>
Niveau d'Activité	K3,K4
Poids Maximum du patient	147 kg
Tailles disponibles	<b>22-29</b> cm
Hauteur de construction	22-25 cm= 65 mm 26-29 cm= 68 mm
Esthétique (côté)	Droite / Gauche = <b>Y</b>
Couleur de l'esthétique	Caucasian / Brun

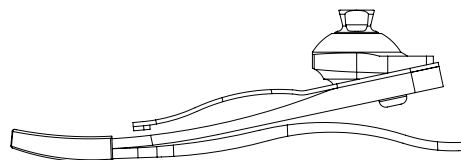

Comment créer sa référence : ORT-PAX3-**MXX**

Patient de 75 kg Impact MOYEN en Taille 27 Gauche couleur CAUCASIAN

Pour le pied : ORT-PAX3-**527**

Pour l'esthétique : ORT-KK-**27L-CAUC**

Comment déterminer son <b>Module</b> ?			
Poids du patient	Niveau d'impact		
	Faible	Moyen	Fort
45-52	1	1	2
53-59	1	2	3
60-68	2	3	4
69-77	3	4	5
78-88	4	5	6
89-100	5	6	7
101-116	6	7	8
117-130	7	8	9
131-147	8	9	
Choix <b>Module</b> (de 1 à 9)			



Référence Esthétique de pied :  
ORT-KK-**XXY-Z**




Esthétique de pied disponible en 2 couleurs (**Z**):

- CAUCASIAN (**CAUC**)
- BRUN (**BRUN**)



**L.P.P.R.**  
◀ 2702367

# Pied TROY PLUS

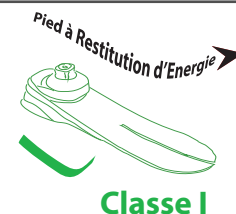

Split Toe



Multi Axial



Vertical Shock



• Confort en Terrain Inégal

• Confort Multi-Axial

• Absorption des Chocs

## Caractéristiques :


- La structure du talon absorbe les chocs et assure une transition contrôlée vers la phase oscillante.
- Bonne stabilité médio-latérale.
- Attaque au talon confortable.
- Léger et résistant.
- Passage du pas facilité par la lame relevée au niveau des orteils.



# Pied TROY PLUS



TROY PLUS	
Référence	ORT-TRP- <b>MXX</b>
Niveau d'Activité	K3,K4
Poids Maximum du patient	147 kg
Tailles disponibles	<b>22-29</b> cm
Hauteur de construction	22-25 cm= 43 mm 26-29 cm= 45 mm
Esthétique (côté)	Droite / Gauche = <b>Y</b>
Couleur de l'esthétique	Caucasian / Brun

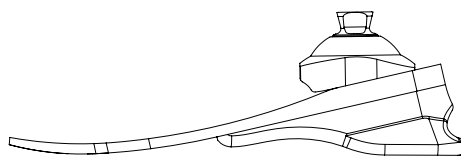

Comment créer sa référence : ORT-TRP-**MXX**

Patient de 75 kg Impact MOYEN en Taille 27 Gauche couleur CAUCASIAN

Pour le pied : ORT-TRP-**527**

Pour l'esthétique : ORT-KK-**27L-CAUC**

Comment déterminer son <b>Module</b> ?			
Poids du patient	Niveau d'impact		
	Faible	Moyen	Fort
45-52	1	1	2
53-59	1	2	3
60-68	2	3	4
69-77	3	4	5
78-88	4	5	6
89-100	5	6	7
101-116	6	7	8
117-130	7	8	9
131-147	8	9	
Choix <b>Module</b> (de 1 à 9)			



Référence Esthétique de pied :  
ORT-KK-**XXY-Z**



Esthétique de pied disponible en 2 couleurs (**Z**):  
• CAUCASIAN (**CAUC**)  
• BRUN (**BRUN**)



**Notes :** \_\_\_\_\_

---

---

**Notes :** \_\_\_\_\_

---

