



Une Gamme complète de pieds à restitution d'énergie

## SYNERGY X3



## PARS X3



## TROY PLUS



## SYNERGY X3 LP



OKO SOLUTION Distributeur exclusif des Pieds Ortotek pour la France & les DROM-COM

# Pied SYNERGY X3



Split Toe



Variable Stiffness



Multi Axial



Vertical Shock



Sport Activity

• **Excellent Confort en Terrain Inégal**

• **X3 = Cadence Variable Homogène**

• **Confort Multi-Axial**

• **Absorption des Chocs Verticaux**

• **Conçu pour les Activités Sportives**

## Caractéristiques :


- Une marche naturelle grâce à la longueur totale du pied, du talon aux orteils, et à sa conception sans vis.
- La conception à 3 lames carbone permet une absorption des chocs verticaux.
- La conception X3 offre une progressivité de la restitution d'énergie.
- Les orteils séparés permettent de marcher confortablement en terrains accidentés.
- Lames en carbone améliorés.
- L'utilisateur peut pratiquer des sports de loisir.
- Pied Aqua compatible\* avec sa Pyramide Titane (eau douce, eau salée, eau chlorée).

\*: Attention: il faut rincer abondamment à l'eau tiède après une utilisation dans l'eau

# Pied SYNERGY X3



| SYNERGY X3               |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Référence                | ORT-SYX3- <b>MXX</b>                   |
| Niveau d'Activité        | K3,K4                                  |
| Poids Maximum du patient | 147 kg                                 |
| Tailles disponibles      | <b>22-29</b> cm                        |
| Hauteur de construction  | 22-25 cm = 155 mm<br>26-29 cm = 165 mm |
| Esthétique (côté)        | Droite / Gauche = <b>Y</b>             |
| Couleur de l'esthétique  | Caucasian / Brun                       |

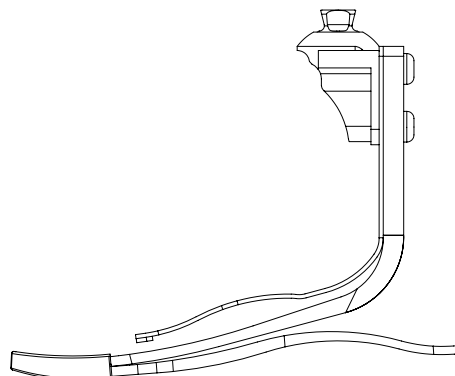

Comment créer sa référence : ORT-SYX3-**MXX**

Patient de 75 kg Impact MOYEN en Taille 27 Gauche couleur CAUCASIAN

Pour le pied : ORT-SYX3-**527**

Pour l'esthétique : ORT-KK-**27L-CAUC**


| Comment déterminer son Module ? |                 |       |      |
|---------------------------------|-----------------|-------|------|
| Poids du patient                | Niveau d'impact |       |      |
|                                 | Faible          | Moyen | Fort |
| 45-52                           | 1               | 1     | 2    |
| 53-59                           | 1               | 2     | 3    |
| 60-68                           | 2               | 3     | 4    |
| 69-77                           | 3               | 4     | 5    |
| 78-88                           | 4               | 5     | 6    |
| 89-100                          | 5               | 6     | 7    |
| 101-116                         | 6               | 7     | 8    |
| 117-130                         | 7               | 8     | 9    |
| 131-147                         | 8               | 9     |      |
| Choix Module (de 1 à 9)         |                 |       |      |

Référence Esthétique de pied :  
ORT-KK-**XXY-Z**



Esthétique de pied disponible en 2 couleurs (**Z**):

- Caucasian (**CAUC**)
- BRUN (**BRUN**)

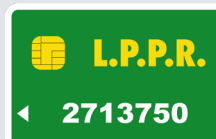

# Pied SYNERGY X3 LP



Split Toe



Variable Stiffness



Multi Axial



Vertical Shock



Sport Activity

• **Excellent Confort en Terrain Inégal**

• **X3 = Cadence Variable Homogène**

• **Confort Multi-Axial**

• **Absorption des Chocs Verticaux**

• **Conçu pour les Activités Sportives et aquatiques**

## Caractéristiques :


- Une marche naturelle grâce à la longueur totale du pied, du talon aux orteils, et à sa conception sans vis.
- La conception à 3 lames carbone permet une absorption des chocs verticaux.
- La conception X3 offre une progressivité de la restitution d'énergie.
- Les orteils séparés permettent de marcher confortablement en terrains accidentés.
- Lames en carbone améliorés.
- L'utilisateur peut pratiquer des sports de loisir.
- Pied Aqua compatible\* avec sa Pyramide Titane (eau douce, eau salée, eau chlorée).

\*: Attention: il faut rincer abondamment à l'eau tiède après une utilisation dans l'eau

# Pied SYNERGY X3 LP



| SYNERGY X3 LP            |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Référence                | ORT-SYX3LP-MXX                         |
| Niveau d'Activité        | K3,K4                                  |
| Poids Maximum du patient | 147 kg                                 |
| Tailles disponibles      | 22-29 cm                               |
| Hauteur de construction  | 22-25 cm = 115 mm<br>26-29 cm = 125 mm |
| Esthétique (côté)        | Droite / Gauche = Y                    |
| Couleur de l'esthétique  | Caucasian / Brun                       |

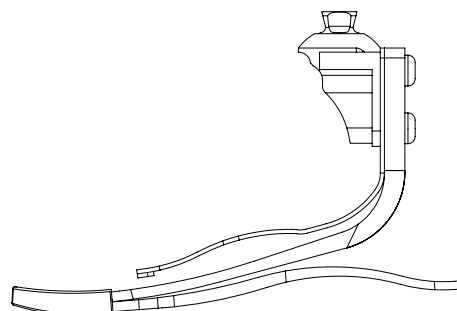

Comment créer sa référence : ORT-SYX3LP-MXX

Patient de 75 kg Impact MOYEN en Taille 27 Gauche couleur CAUCASIAN

Pour le pied : ORT-SYX3LP-527

Pour l'esthétique : ORT-KK-27L-CAUC

| Comment déterminer son Module ? |                 |       |      |
|---------------------------------|-----------------|-------|------|
| Poids du patient                | Niveau d'impact |       |      |
|                                 | Faible          | Moyen | Fort |
| 45-52                           | 1               | 1     | 2    |
| 53-59                           | 1               | 2     | 3    |
| 60-68                           | 2               | 3     | 4    |
| 69-77                           | 3               | 4     | 5    |
| 78-88                           | 4               | 5     | 6    |
| 89-100                          | 5               | 6     | 7    |
| 101-116                         | 6               | 7     | 8    |
| 117-130                         | 7               | 8     | 9    |
| 131-147                         | 8               | 9     |      |
| Choix Module (de 1 à 9)         |                 |       |      |

Référence Esthétique de pied :  
ORT-KK-XXY-Z



Esthétique de pied disponible en 2 couleurs (Z):


- Caucasian (CAUC)
- BRUN (BRUN)





# Pied PARS X3

1 2 3 4

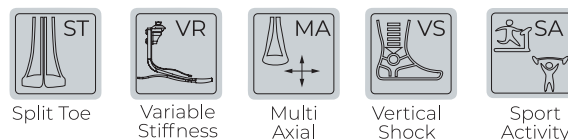

- Excellent Confort en Terrain Inégal
- X3 = Cadence Variable Homogène
- Confort Multi-Axial
- Absorption des Chocs Verticaux
- Conçu pour les Activités Sportives


## Caractéristiques :

- Une marche naturelle grâce à la longueur totale du pied, du talon aux orteils, et à sa conception sans vis.
- La conception à 3 lames carbone permet une absorption des chocs verticaux.
- La conception X3 offre une progressivité de la restitution d'énergie.
- Les orteils séparés permettent de marcher confortablement en terrains accidentés.
- Son faible encombrement permet l'utilisation d'un amortisseur de chocs et de torsion.
- L'utilisateur peut pratiquer des sports de loisir.

# Pied PARS X3



| PARS X3                  |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Référence                | ORT-PAX3- <b>MXX</b>               |
| Niveau d'Activité        | K3,K4                              |
| Poids Maximum du patient | 147 kg                             |
| Tailles disponibles      | <b>22-29</b> cm                    |
| Hauteur de construction  | 22-25 cm= 65 mm<br>26-29 cm= 68 mm |
| Esthétique (côté)        | Droite / Gauche = <b>Y</b>         |
| Couleur de l'esthétique  | Caucasian / Brun                   |

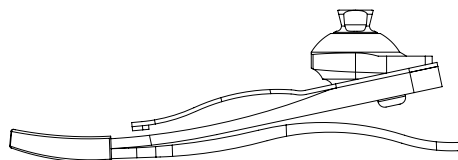

Comment créer sa référence : ORT-PAX3-**MXX**

Patient de 75 kg Impact MOYEN en Taille 27 Gauche couleur CAUCASIAN

Pour le pied : ORT-PAX3-**527**

Pour l'esthétique : ORT-KK-**27L-CAUC**

| Comment déterminer son <b>Module</b> ? |                 |       |      |
|----------------------------------------|-----------------|-------|------|
| Poids du patient                       | Niveau d'impact |       |      |
|                                        | Faible          | Moyen | Fort |
| 45-52                                  | 1               | 1     | 2    |
| 53-59                                  | 1               | 2     | 3    |
| 60-68                                  | 2               | 3     | 4    |
| 69-77                                  | 3               | 4     | 5    |
| 78-88                                  | 4               | 5     | 6    |
| 89-100                                 | 5               | 6     | 7    |
| 101-116                                | 6               | 7     | 8    |
| 117-130                                | 7               | 8     | 9    |
| 131-147                                | 8               | 9     |      |
| Choix <b>Module</b> (de 1 à 9)         |                 |       |      |



Référence Esthétique de pied :  
ORT-KK-**XXY-Z**



Esthétique de pied disponible en 2 couleurs (**Z**):

- Caucasian (**CAUC**)
- BRUN (**BRUN**)



# Pied TROY PLUS



Split Toe



Multi Axial



Vertical Shock



• Confort en Terrain Inégal

• Confort Multi-Axial

• Absorption des Chocs


## Caractéristiques :

- La structure du talon absorbe les chocs et assure une transition contrôlée vers la phase oscillante.
- Bonne stabilité médio-latérale
- Attaque au talon confortable
- Léger et résistant
- Passage du pas facilité par la lame relevée au niveau des orteils

# Pied TROY PLUS



| TROY PLUS                |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Référence                | ORT-TRP- <b>MXX</b>                |
| Niveau d'Activité        | K3,K4                              |
| Poids Maximum du patient | 147 kg                             |
| Tailles disponibles      | <b>22-29</b> cm                    |
| Hauteur de construction  | 22-25 cm= 43 mm<br>26-29 cm= 45 mm |
| Esthétique (côté)        | Droite / Gauche = <b>Y</b>         |
| Couleur de l'esthétique  | Caucasian / Brun                   |

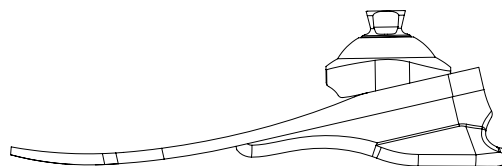

Comment créer sa référence : ORT-TRP-**MXX**

Patient de 75 kg Impact MOYEN en Taille 27 Gauche couleur CAUCASIAN

Pour le pied : ORT-TRP-**527**

Pour l'esthétique : ORT-KK-**27L-CAUC**

| Comment déterminer son <b>Module</b> ? |                 |       |      |
|----------------------------------------|-----------------|-------|------|
| Poids du patient                       | Niveau d'impact |       |      |
|                                        | Faible          | Moyen | Fort |
| 45-52                                  | 1               | 1     | 2    |
| 53-59                                  | 1               | 2     | 3    |
| 60-68                                  | 2               | 3     | 4    |
| 69-77                                  | 3               | 4     | 5    |
| 78-88                                  | 4               | 5     | 6    |
| 89-100                                 | 5               | 6     | 7    |
| 101-116                                | 6               | 7     | 8    |
| 117-130                                | 7               | 8     | 9    |
| 131-147                                | 8               | 9     |      |
| Choix <b>Module</b> (de 1 à 9)         |                 |       |      |



Référence Esthétique de pied :  
ORT-KK-**XXY-Z**



Esthétique de pied disponible en 2 couleurs (**Z**):

- Caucasian (**CAUC**)
- BRUN (**BRUN**)





**SYNERGY  
X3**



**PARS X3**



**SYNERGY  
X3 LP**



**TROY PLUS**